

Stručný návod k odběru krve u ptáků

Při odběru krve u ptáků se, prosím, řiďte informacemi ve všeobecném návodu k odběru vzorků krve. Dostatečné množství krve u ptáků je 0,1 ml ve zkumavce s EDTA.

Stručný návod k odběru skořápky

1. Odstraňte skořápku z hnízda ihned po vylíhnutí ptáčete.
2. Je důležité, aby nedošlo k záměně skořápek. Musí být zcela zřejmé, kterému ptákovi daní skořápka patří. Skořápka může být na vnějším povrchu označena.
3. Nedotýkejte se materiálu uvnitř skořápky. K provedení genetického je nezbytná pupeční šňůra (krvavá žilka) v bláně uvnitř vajíčka.
4. Pokud je vajíčko z vnějšího povrchu zaneseno exkrementy, otřete jej pečlivě vlhkým ubrouskem.
5. Nechte skořápku schnout na vzduchu po dobu cca 24 hodin, vnější i vnitřní povrch by měl být zcela suchý.
6. Vložte skořápku nejlépe do malé plastové či papírové krabičky, zamezíte tak rozdrčení skořápky při transportu.
7. Označte krabičku identifikačními údaji ptáka.
8. Vložte krabičku do obálky (doporučujeme bublinkovou obálku) a zašlete na adresu naší laboratoře:

Genomia
Teslova 3
301 00 Plzeň
Česká republika

Stručný návod k odběru vzorku peří

1. Vytrhněte 5-7 kusů jemného ptačího peří. Nepoužívejte peří vypadnuté a ani peří nestříhejte.
2. Vložte peří do čisté obálky.
3. Označte obálku jednoznačnými identifikačními údaji (např. přidělené identifikační číslo, jméno ptáka apod.).
4. Vložte obálku do větší obálky a zašlete standardní poštou na adresu naší laboratoře:

Genomia
Teslova 3
301 00 Plzeň
Česká republika