

Vážený zákazníku!

Právě Vám byla doručena zásilka obsahující sadu pro provedení genetického testu.

Zásilka obsahuje:

- 4 x sterilní kartáček ke stěru sliznice ústní dutiny
- 2 x žlutou obdélníkovou obálku pro uložení vzorků jednotlivých testovaných osob
- bublinkovou obálku se zpáteční adresou

Provedte stěr sliznice ústní dutiny pro každou testovanou osobu:

1. Je vhodné 15 minut před stěrem nejíst ani nepít.
2. Vyjměte sterilní kartáček z obalu. Štětinek kartáčku se nedotýkejte! Dávejte pozor, aby se štětinky kartáčku nedotkly jiného povrchu než ústní dutiny odebírané osoby.
3. Umístěte kartáček mezi líci a čelist a setřete cca 10 x protisměrným tahem i rotací kartáčku. Pokuste se zajistit kontakt z obou stran kartáčku. Po dokončení stěru by mělo být na kartáčku zachyceno viditelné množství buněk.
4. Kartáček nechte chvíli oschnout na vzduchu – držte jej, nepokládejte. Na vlhkém kartáčku by mohly cestou do laboratoře začít hnilobné procesy.
5. Suchý kartáček vložte přímo do žluté obdélníkové obálky nadepsané identifikací vzorku.
6. Opakujte odběr i s druhým kartáčkem. Vložte jej do obálky k prvnímu kartáčku a obálku zalepte.
7. Odebrané vzorky v zalepených žlutých obálkách vložte do bublinkové obálky se zpáteční adresou.
8. Zašlete poštou na adresu naší laboratoře: **Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, Česká republika**

Provádíte-li stěr sliznice ústní dutiny kojenému dítěti, je vhodné provést odběr vzorku alespoň 30 min po posledním kojení. Minimalizujete tak riziko kontaminace vzorku buňkami matky.

Video instrukce k provedení stěru sliznice ústní dutiny najdete na: www.genomia.cz/cz/human-sampling-video/

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit emailem laborator@genomia.cz nebo telefonicky **+420 3737 49999**.

S přátelským pozdravem

Genomia tým