

### Sehr geehrter Kunde!

Sie haben gerade eine Sendung mit dem Testkit zur Ausführung des genetischen Tests erhalten. Die Sendung beinhaltet:

- 4x sterile Bürsten zum Mundhöhlenschleimhautabstrich
- 2x gelber länglicher Briefumschlag zum Einlegen von den Proben der einzelnen geprüften Personen
- Luftpolsterumschlag mit Rückadresse

### Führen Sie den Mundhöhlenschleimhautabstrich für jede geprüfte Person durch:

1. Es wird empfohlen 15 Minuten vor dem Abstrich nicht zu essen und trinken.
2. Nehmen Sie die sterile Bürste aus der Packung aus. Fassen Sie die Borsten nicht an! Achten Sie darauf, dass die Borsten keine andere Oberfläche als die Mundhöhlenschleimhaut der untersuchten Person berühren.
3. Legen Sie die Bürste zwischen die Wange und den Kiefer und streichen Sie ca. 10Mal in Gegenrichtung und durch Drehen der Bürste die Schleimhaut ab. Versuchen Sie den Kontakt mit Bürste an beiden Seiten der Bürste zu sichern. Nach dem Abstrich sollte auf der Bürste die entnommene Menge der Schleimhautzellen sichtbar sein.
4. Lassen Sie die Bürste auf der Luft trocknen – bitte nicht ablegen, sondern in der Hand halten. Auf feuchter Bürste könnten auf dem Weg ins Labor Fäulnisprozesse beginnen.
5. Legen Sie die trockene Bürste direkt in den länglichen Umschlag beschrieben mit Identifikationsangaben.
6. Wiederholen Sie den Abstrich mit der zweiten Bürste. Legen Sie die zweite Bürste zu der ersten in den gleichen Umschlag ein. Kleben Sie den Umschlag zu.
7. Legen Sie den zugeklebten gelben Umschlägen mit Proben in den Luftpolsterumschlag mit der Rückadresse ein.
8. Senden Sie den Luftpolsterumschlag per Post an die Adresse unseres Labors: **Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, Tschechische Republik**

Wenn Sie den Mundhöhlenschleimhautabstrich eines gestillten Kindes machen, sollte die Probe mindestens 30 Minuten nach dem letzten Stillen entnommen werden. Minimalisieren Sie das Risiko der Kontaminierung der Proben durch die Zellen der Mutter.

Anweisungsvideo zum Mundhöhlenschleimhautabstrich finden Sie auf:  
[www.genomia.cz/cz/human-sampling-video/](http://www.genomia.cz/cz/human-sampling-video/)

Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns mittels einer E-Mail-Nachricht [laborator@genomia.cz](mailto:laborator@genomia.cz) oder rufen Sie uns an **+420 3737 49999**.

Mit freundlichen Grüßen

Genomia Team