

Vážený zákazníku!

Právě Vám byla doručena zásilka obsahující sadu pro provedení genetického genealogického testu.

Zásilka obsahuje:

- přehled objednávky genealogického testu
- 2 x sterilní kartáček ke stěru sliznice ústní dutiny
- obdélníkovou obálku pro uložení obou stěrových kartáčků
- bublinkovou obálku se zpáteční adresou
- informovaný souhlas klienta s genetickým genealogickým testováním

Přečtěte si, prosím, pečlivě informovaný souhlas klienta, formulář vyplňte a podepište.

Provedte stěr sliznice ústní dutiny:

1. Je vhodné 15 minut před stěrem nejíst ani nepít.
2. Vyjměte sterilní kartáček z obalu. Štětinek kartáčku se nedotýkejte! Dávejte pozor, aby se štětinky kartáčku nedotkly jiného povrchu než ústní dutiny odebírané osoby.
3. Umístěte kartáček mezi líci a čelist a setřete cca 10 x protisměrným tahem i rotací kartáčku. Pokuste se zajistit kontakt z obou stran kartáčku. Po dokončení stěru by mělo být na kartáčku zachyceno viditelné množství buněk.
4. Kartáček nechte chvíli oschnout na vzduchu – držte jej, nepokládejte. Na vlhkém kartáčku by mohly cestou do laboratoře začít hnilobné procesy.
5. Suchý kartáček vložte přímo do obdélníkové obálky nadepsané číslem vzorku.
6. Opakujte odběr i s druhým kartáčkem. Vložte jej do obálky k prvnímu kartáčku a obálku zalepte.
7. Do bublinkové obálky se zpáteční adresou vložte:
 - podepsaný a vyplněný informovaný souhlas
 - obálku s kartáčky
8. Zašlete poštou na adresu naší laboratoře: **Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, Česká republika**

Výsledky Vašeho genealogického testu budou zaslány do 14 dní po obdržení vzorku naší laboratoří na Vaši adresu uvedenou na informovaném souhlasu.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit emailem laborator@genomia.cz nebo telefonicky **+420 3737 49999**.

S přátelským pozdravem

Genomia tým