

Dobrý den,

na základě přijetí Vaší objednávky na test alergií Vás prosíme o vyznačení a doplnění příznaků alergie, které pacient vykazuje:

- respirační problémy
- zažívací problémy
- kožní projevy včetně lokalizace problémů
- věk, kdy se projeví první příznaky
- svědění
- roční období, kdy jsou projevy nejintenzivnější, případně celoroční
- kde jsou příznaky horší (venku, uvnitř budov, bez rozdílů)
- probíhá léčba nebo dieta, případně jaká

Pro testování je **nutný vzorek séra – pro psy a kočky: potřebný objem je 3 ml**
– pro koně: potřebný objem je 6 ml

Dodržte tento postup při odběru vzorku pro získání séra z krve:

- **krev se odebere do zkumavky bez antikoagulantu. (obr. 1),**
- **krev se nechá stát cca 15-30 minut,**
- **odstředování 5 min při 4000 otáčkách / min,**
- **výsledná separace séra do prázdné zkumavky. (obr. 2).**

obr. 1



obr. 2



Dodržením postupu odběru séra předejdete falešně negativním nebo zkresleným výsledkům.

Skladování a zaslání vzorku nevyžaduje speciální podmínky. Vzorek nemrazte. Do odeslání jej uchovávejte v lednici. Vzorek séra obalte ubrouskem a vložte do bublinkové obálky. Zásilka nevyžaduje chlazení.

Vzorek zašlete na adresu laboratoře: Genomia, Republikánská 6, 31200 Plzeň. Děkujeme.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte.

S pozdravem a přáním pěkného dne

laboratoř Genomia