

Postup odběru vzorku pro testování alergií

1. Pro testování je potřeba vzorek krevního séra. Objem séra pro jednotlivé druhy zvířat:

KŮŇ	:	5 ml
PES	:	3 ml
KOČKA	:	3 ml

2. Zkumavku označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete (číslem vzorku, pokud Vám bylo přiděleno při online objednávce testů; jménem zvířete; mikročipem...).
3. Zkumavku zabalte do ubrousku - zajistíte ji tak proti nárazu, aby nemohlo dojít k jejímu rozbití.
4. Zkumavku pak vložte do igelitového sáčku, sáček uzavřete. Sáček také označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete.
5. Zabalenou zkumavku vložte do bublinkové obálky se zpáteční adresou a odešlete poštou na adresu laboratoře:

Genomia s.r.o., Republikánská 6, 31200 Plzeň