

Postup odběru ptačí krve do zkumavky s EDTA

Vhodné pro stanovení pohlaví ptáků, APV + PBFD, Chlamydophily psittaci a genetického profilu.

1. Krev odebírejte do zkumavky s EDTA, dostatečné množství krve je 0,1 ml.
2. Zkumavku označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete (jménem; mikročipem; číslem kroužku, laboratorním číslem vzorku...).
3. Zkumavku zabalte do ubrousku - zajistíte ji tak proti nárazu, aby nemohlo dojít k jejímu rozbití.
4. Zkumavku pak vložte do igelitového sáčku, sáček uzavřete. Sáček označte stejnou jednoznačnou identifikací vyšetřovaného zvířete.
5. Zabalenou zkumavku vložte do pevné/bublinkové obálky a odešlete na adresu laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 31200 Plzeň, Česká republika

Postup odběru ptačí krve do zkumavky s etanolem

Vhodné pro stanovení pohlaví ptáků a genetického profilu.

1. Zkumavku se 70 % etanolem označte jednoznačnou identifikací vyšetřovaného jedince (jménem; mikročipem; číslem kroužku, laboratorním číslem vzorku...).
2. Uzavíratelný sáček pro uložení zkumavky se vzorkem označte stejnou identifikací vyšetřovaného jedince jako zkumavku.
3. Odeberte několik kapek krve do zkumavky se 70 % etanolem.
4. Uzavřenou zkumavku zajistěte proti vylití obsahu – obalte víčko parafínovou fólií.
5. Zkumavku vložte do označeného igelitového sáčku a sáček uzavřete.
6. Vzorky v označených sáčcích vložte do pevné/bublinkové obálky a odešlete na adresu laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 31200 Plzeň, Česká republika

Postup odběru ptačí krve na odběrovou kartu

Vhodné pro testování APV + PBFD a stanovení pohlaví ptáků.

1. Na odběrovou kartu napište jednoznačnou identifikaci vyšetřovaného zvířete (jménem; mikročipem; číslem kroužku, laboratorním číslem vzorku...).
2. Krev se nejčastěji odebírá z křídelní žíly nebo po odstřížení části dráčku. Pro odběr vzorku na kartu stačí 3 kapky krve.
3. Místo pro aplikaci kapky krve je označeno nápisem „vzorek krve“. Přiložte kartu tímto místem ke kapce krve z křídelní žíly nebo dráčku a nechte krev vsáknout do karty.
4. Kartu nechte zcela zaschnout na vzduchu (asi 30 min). Poté vložte kartu zpět do uzavíratelného sáčku. Pokud by krev nebyla zaschlá, vzorek by cestou do laboratoře degradoval.
5. Vzorky vložte do pevné/bublinkové obálky a odešlete na adresu laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 31200 Plzeň, Česká republika