

Postup odběru skořápky

Vhodné pro testování: stanovení pohlaví a DNA profilu ptáků.

1. Odstraňte skořápku z hnízda ihned po vylíhnutí ptáčete.
2. Je důležité, aby nedošlo k záměně skořápek. Musí být zcela zřejmé, kterému ptáčeti daná skořápka patří. Skořápka může být na vnějším povrchu označena.
3. Nedotýkejte se materiálu uvnitř skořápky. K provedení genetického testu je nezbytná krvavá žilka v bláně uvnitř vajíčka.
4. Pokud je vajíčko z vnějšího povrchu zaneseno exkrementy, otřete je pečlivě vlhkým ubrouskem.
5. Nechte skořápku oschnout na vzduchu. Vnější i vnitřní povrch by měl být zcela suchý, aby vzorek cestou do laboratoře nedegradoval.
6. Vložte skořápku nejlépe do malé plastové či papírové krabičky, zamezíte tak rozdrčení skořápky při transportu.
7. Označte krabičku identifikačními údaji ptáčete.
8. Vzorek odešlete na adresu laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 31200 Plzeň

Postup odběru vzorku peří

Vhodné pro testování: APV+ PBFD a stanovení pohlaví ptáků.

1. Vytrhněte 5-7 kusů jemného ptačího peří. Nepoužívejte peří vypadlé, ani peří nestřihejte.
2. Vložte peří do čisté obálky nebo sáčku. Obálku zalepte / sáček uzavřete.
3. Označte obálku/sáček jednoznačnými identifikačními údaji jedince (např. číslem kroužku nebo mikročipem).
4. Vzorek vložte do poštovní obálky a odešlete na adresu laboratoře: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 31200 Plzeň