

Stručné instrukce k odběru koňských žíní

1. Vytrhněte pramínek žíní z hřívky nebo ocasu.
2. Žíně musí obsahovat viditelnou chlupovou cibulku.
3. Pro analýzu laboratoř potřebuje minimálně 20 cibulek.
4. Žíně vložte do čisté obálky. Obálku zalepte.
5. Obálku označte jednoznačnou identifikací vzorku (např. přiřazeným číslem vzorku nebo jinou identifikací).
6. Označenou obálku vložte poštovní obálky, kterou odešlete na adresu laboratoře:

Genomia
Janáčkova 51
323 00 Plzeň