

## Stručné instrukce k odběru koňských žíní

1. Vytrhněte pramínek žíní z hřívy nebo ocasu.
2. Žíně musí obsahovat viditelnou chlupovou cibulku.
3. Pro analýzu je potřeba minimálně 20 chlupových cibulek.
4. Žíně vložte do čisté obálky. Obálku zalepte.
5. Obálku označte jednoznačnou identifikací jedince (např. číslem vzorku, pokud Vám bylo přiděleno při online objednávce testů; jménem zvířete; mikročipem, tetováním).
6. Označenou obálku vložte poštovní obálky, kterou odešlete na adresu laboratoře:

Genomia s.r.o., Republikánská 6, 31200 Plzeň