

Kurze Anweisung zur Roßhaar entnahme

- 1) Reißen Sie den Strang Roßhaar aus der Mähne oder Schweif aus.
- 2) Die Roßhaar müssen die sichtbar Haarzwiebel beinhalten.
- 3) Für die Analyse benötigt Labor mindestens 20 Haarzwiebel.
- 4) Legen Sie Roßhaar in einen sauberen Umschlag an. Verkleben Sie den Umschlag.
- 5) Die Umschlag zeichnen Sie eindeutige Identifizierung der Proben (z. B. eine Probe zugeordnet Nummer oder eine andere Identifikation).
- 6) Legen Sie den bezeichneten Umschlag mit Roßhaar in den Luftblasenumschlag mit Rückadresse und senden Sie den Umschlag mit gewöhnlicher der Post an die Adresse des Labors ab.

Genomia
Janackova 51
323 00 Plzeň
Czech Republic