

Kurze Anweisung zur Roßhaar entnahme

- 1) Reißen Sie den Strang Roßhaar aus der Mähne oder Schweif aus.
- 2) Die Roßhaar müssen die sichtbar Haarzwiebel beinhalten.
- 3) Für die Analyse benötigt Labor mindestens 20 Haarzwiebel.
- 4) Legen Sie Roßhaar in einen sauberen Umschlag an. Verkleben Sie den Umschlag.
- 5) Die Umschlag zeichnen Sie eindeutige Identifizierung der Proben (z. B. eine Probe zugeordnet Nummer oder eine andere Identifikation).
- 6) Legen Sie den bezeichneten Umschlag mit Roßhaar in den Luftblasenumschlag mit Rückadresse und senden Sie den Umschlag mit gewöhnlicher der Post an die Adresse des Labors ab.

Genomia
Republikánská 6
312 00 Plzeň
Czech Republic