

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben gerade eine Sendung mit dem Testkit zur Ausführung des genetischen genealogischen Tests erhalten.

Die Sendung enthält:

- Übersicht der Bestellung des genealogischen Tests
- 2x sterile Bürsten zum Wangenabstrich
- Länglicher Briefumschlag zum Einlegen von beiden Abstrichbürsten
- Luftpolsterumschlag mit Rückadresse
- Informierte Zustimmung des Kunden zum genetischen genealogischen Test

Lesen Sie sich, bitte, sorgfältig die informierte Zustimmung des Kunden durch, füllen Sie das Formular aus und unterzeichnen Sie es.

Führen Sie den Wangenabstrich durch:

1. Es wird empfohlen 15 Minuten vor dem Abstrich nicht zu essen und trinken.
2. Nehmen Sie die sterile Bürste aus der Packung aus. Achten Sie darauf, dass die Borsten keine andere Oberfläche als die Mundhöhlenschleimhaut der untersuchten Person berühren.
3. Legen Sie die Bürste zwischen die Wange und den Kiefer und streichen Sie ca. 10 Mal in Gegenrichtung und durch Drehen der Bürste die Schleimhaut ab. Versuchen Sie den Kontakt mit Bürste an beiden Seiten der Bürste zu sichern. Nach dem Abstrich sollte auf der Bürste die entnommene Menge der Schleimhautzellen sichtbar sein.
4. Lassen Sie die Bürste auf der Luft trocknen – bitte nicht ablegen, sondern in der Hand halten. Auf feuchter Bürste könnten auf dem Weg ins Labor Fäulnisprozesse beginnen.
5. Legen Sie die trockene Bürste direkt in den länglichen Umschlag, der mit der Probennummer bezeichnet ist, ein.
6. Wiederholen Sie den Abstrich mit der zweiten Bürste. Legen Sie die zweite Bürste zu der ersten in den gleichen Umschlag ein. Kleben Sie den Umschlag zu.
7. Legen Sie in den Luftpolsterumschlag mit der Rückadresse:
 - Die unterzeichnete und ausgefüllte informierte Zustimmung
 - Umschlag mit Bürsten ein
8. Senden Sie den Luftpolsterumschlag per Post an die Adresse unseres Labors:
Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, Tschechische Republik

Die Ergebnisse Ihres genealogischen Tests werden Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Probe in unserem Labor an Ihre in der informierten Zustimmung angeführte Adresse gesendet.

Sollten Sie noch Fragen haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail laborator@genomia.cz oder rufen Sie uns an **+420 3737 49999**.

Mit freundlichen Grüßen

Genomia Team