

Instrukcja pobrania krwi

Pobranie krwi wykonywane jest przez lekarza weterynarii!

Pobierz krew w sposób niekrzepliwy do probówek EDTA (K2 lub K3).

Wystarczająca ilość to 0,5 ml do 1 ml krwi.

Wstrząśnij probówką, aby krew dobrze wymieszała się z antykoagulantem.

Oznacz probówkę unikalnym identyfikatorem badanego zwierzęcia (numer próbki, jeśli został Ci przydzielony; imię zwierzęcia; mikroczip itp.).

Krew należy przechowywać w lodówce. Wyślij krew tak szybko, jak to możliwe po pobraniu.

Instrukcja dotycząca wysyłania próbki krwi

Zawiń probówkę w serwetkę, aby zabezpieczyć ją przed uderzeniem, aby nie mogło dojść do jej rozbicia. Następnie umieść probówkę w plastikowym woreczku, zamknij woreczek.

Oznacz woreczek jednoznacznym identyfikatorem badanego zwierzęcia (numer próbki, jeśli został Ci przydzielony; imię zwierzęcia; mikroczip...).

Umieść zapakowaną probówkę w grubszej kopercie i wyślij ją na adres laboratorium w Czechach lub Polsce:

Genomia s.r.o., ul. Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Czech Republic

Genomia Polska, 95-070 Ciężków, ul. Platanowa 25, Polska

Zamów zestawy

Istnieje możliwość zamówienia zestawu do pobrania krwi, który zostanie wysłany do laboratorium Genomia. Możesz złożyć zapytanie o probówkę podczas tworzenia zamówienia na test genetyczny online. Weterynarz pobierze próbkę do dołączonej probówki. W skład zestawu dostarczonego przez firmę Genomia wchodzi:

- sterylna probówka z czynnikiem zapobiegającym krzepnięciu krwi (EDTA)
- zamykany woreczek oznaczony etykietą
- koperta z adresem zwrotnym

Uwaga: Organizacje hodowlane mogą mieć określone wymagania dotyczące pobierania próbek. Pobranie próbki bez potwierdzenia tożsamości osobnika przez niezależny organ nie musi być uznane przez organizację hodowlaną.