

Instrukcje dotyczące pobrania próbek do analizy mikrobiomu

Zestaw do pobrania próbek

Zestaw do pobrania wysyłamy po złożeniu zamówienia online na badanie mikrobiomu w www.genomia.cz. Zestaw do pobrania próbek jest wliczony w cenę badania i zawiera:

- sterylną probówkę Copan eNAT z nakrętką, która zawiera specjalne podłoże transportowe, którego zadaniem jest stabilizacja i ochrona DNA i RNA w próbkach
- patyczek do pobrania próbki FLOQSwabs
- kopertę z adresem zwrotnym

Pobranie próbki krok za krokiem

Przeprowadzenie pobrania jest proste i nie wiąże się z wizytą u weterynarza.

1. Dokładnie umyj ręce przed rozpoczęciem pobierania. Możesz również użyć rękawic ochronnych.
2. Sprawdź, czy opakowanie jest nienaruszone, w okresie gwarancyjnym, bez śladów uszkodzeń lub zanieczyszczeń.
3. Wyjmij probówkę i patyczek do pobrania próbki ze sterylnego opakowania.
4. Główka patyczka musi być sucha i sterylna. Nie dotykaj jej ani nie umieszczaj na żadnej powierzchni przed pobraniem.
5. Pobierz próbkę błony śluzowej odbytu za zwieraczem odbytu (ok. na głębokości 3-5 cm w zależności od wielkości zwierzęcia). Delikatnie obracaj patyczek po ścianie odbytnicy, najlepiej przez 5-10 sekund. Pobranie odbywa się z błony śluzowej, a nie tylko z kału.
6. Patyczek z pobranym materiałem włóż od razu do probówki, załam w zaznaczonym punkcie i szczelnie zamknij nakrętką.
7. Oznacz probówkę jednoznaczną identyfikacją badanego zwierzęcia (numer próbki, jeśli został przypisany; imię zwierzęcia; mikroczip...).

Wysłanie próbki

1. Zawień probówkę w serwetkę, aby zabezpieczyć ją przed uderzeniem i ewentualnym pęknięciem.
2. Następnie umieść probówkę w plastikowej torbie i ponownie oznacz ją jednoznaczną identyfikacją badanego zwierzęcia.
3. Zapakowaną probówkę umieść w dołączonej kopercie i wyślij pod adres laboratorium: Genomia, ul. Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Czech Republic
4. Próbką może być przenoszona i przechowywana w temperaturze pokojowej (2-25 °C) przez okres do 4 tygodni